


TADs процедура


Хірургічна процедура.

Конструкція ортодонтичного апарату з кістковою опорою вимагає від клініциста точного планування терапії. Його міркування, думка та підготовка в кожному конкретному випадку також враховуватимуть усі фактори, які можуть виникнути внаслідок передопераційних обстежень, таких як: анамнез, об'єктивні дослідження, рентгенологічні, інструментальні та лабораторні дослідження.


Як тільки місце хірургічного втручання та більш відповідні TAD визначені, анестезуйте анатомічне місце. TAD, що самосвердувальні, однак у разі високої щільності або товщини кістки рекомендується свердлити кортикальну кістку свердлом для міні-імплантатів Ø 1,5 мм (REF 090-1534-00) для зручнішої установки TAD.

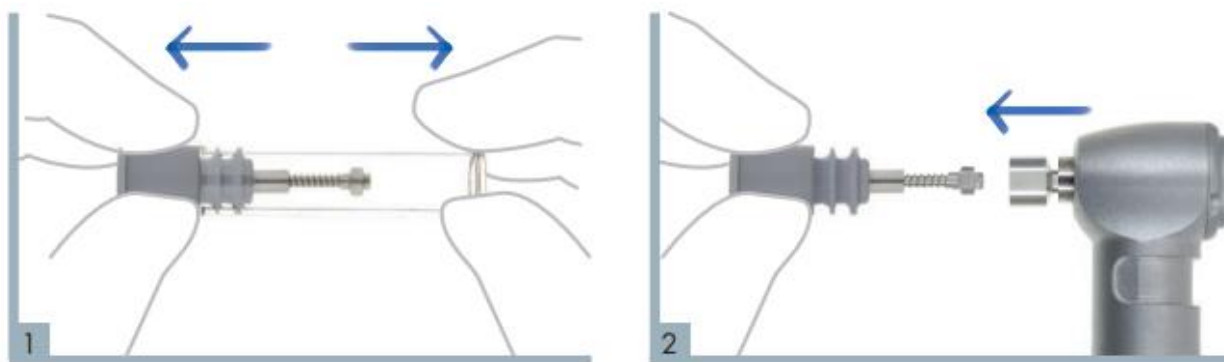

Злегка потягнувши за кришку флакона, вийміть TAD із стерильної упаковки. Підключіть спеціальний адаптер наконечника до (083-1005-01) головки TAD.

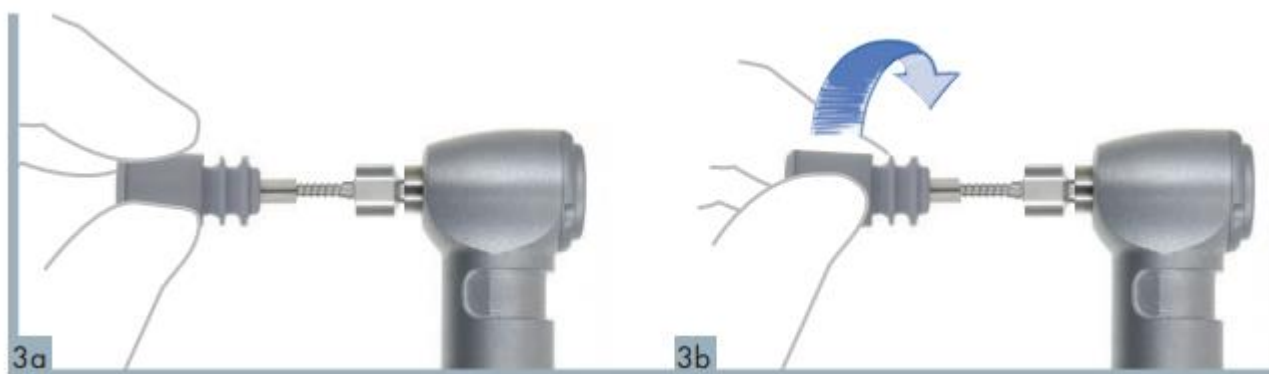


Після встановлення в адаптер зніміть ковпачок імплантата легким обертовим рухом проти годинникової стрілки.

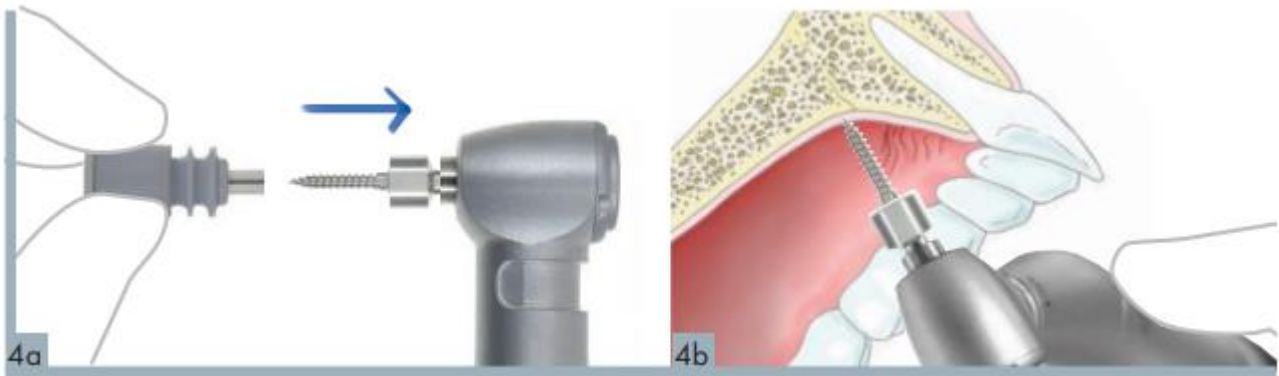

Встановіть максимальну швидкість 30 об/хв і максимальний крутний момент 30 Нсм, почніть свердління TAD в піднебінному склепінні.


TADs - процедура зняття відбитку.

Звичайне зняття відбитків.

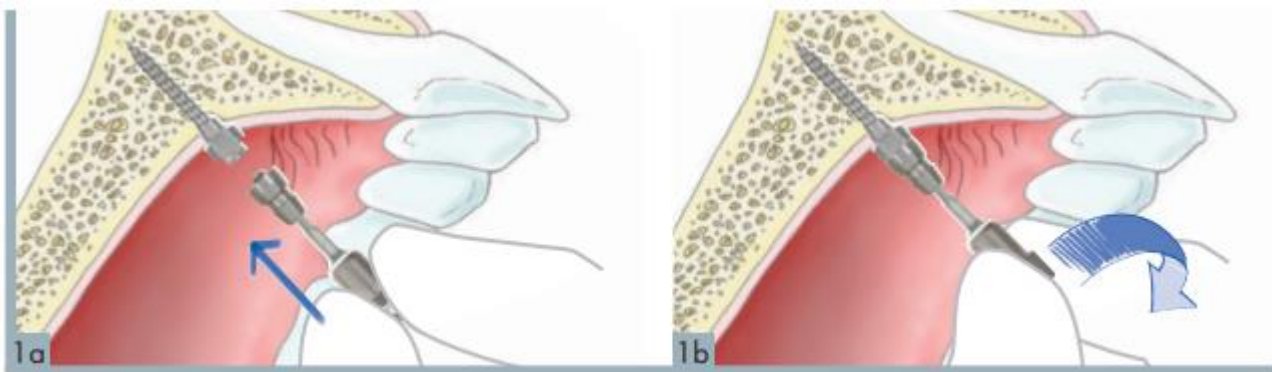


Вкрутіть трансфер (043-0001-00) у частину TAD, що виступає, за допомогою спеціальної викрутки для фіксуючого гвинта (083-0001-00 або 083-0002-00).

2. Зніміть відбиток за допомогою еластомірного матеріалу.

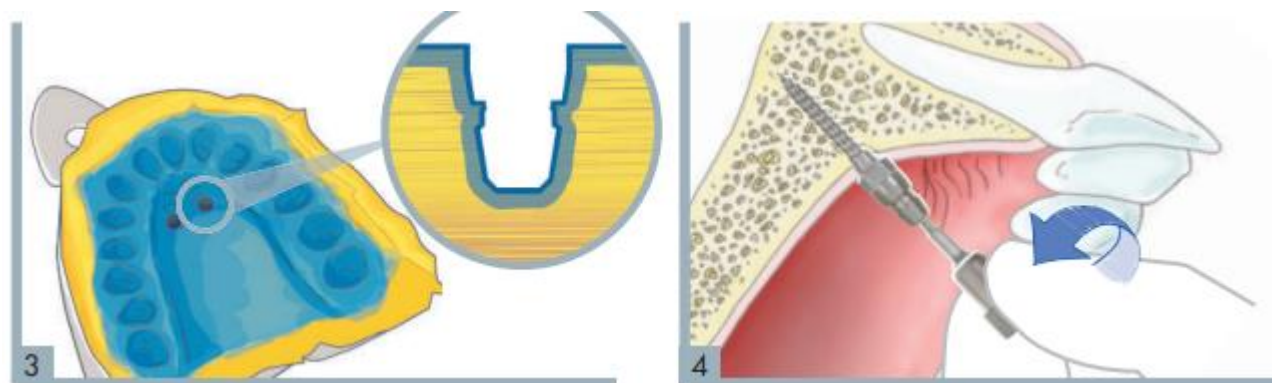


Після зняття відбитку трансфер залишається на TAD, а у відбитковому матеріалі створюється їх форма. Викрутіть трансфер за допомогою викрутки для фіксуючого гвинта (083-0001-00,083-0002-00).

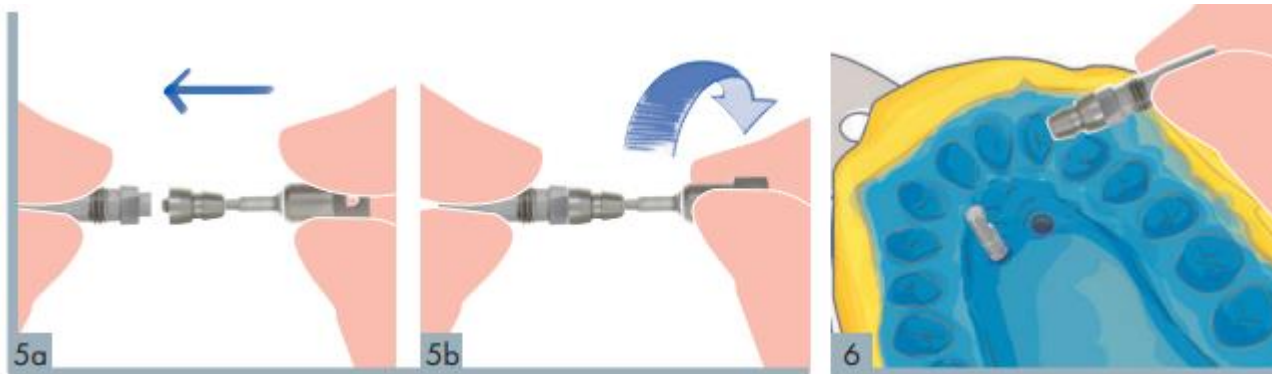


Прикрутіть трансфер на аналог 053-0001-00. 6. Замініть складання аналог-трансфер на місце у відбитку. Специфічна форма трансферу дозволяє легко визначити, коли досягається правильне введення. Створіть зубний зліпок, у який вбудовані аналоги.


Цифрове зняття відбитку.

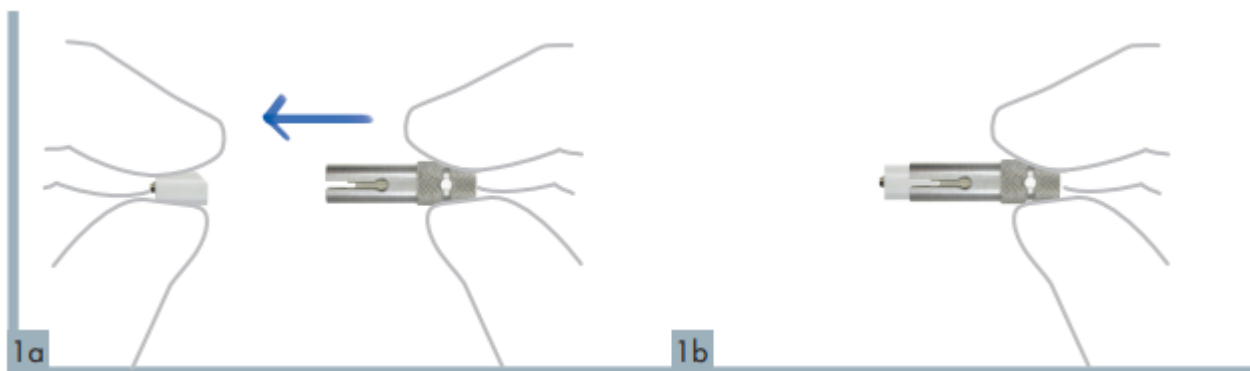

Вставте Scanbody043-000 -35 у спеціальний позиціонер 083-0004-00 для Scanbody, забезпечивши ідеальне з'єднання.

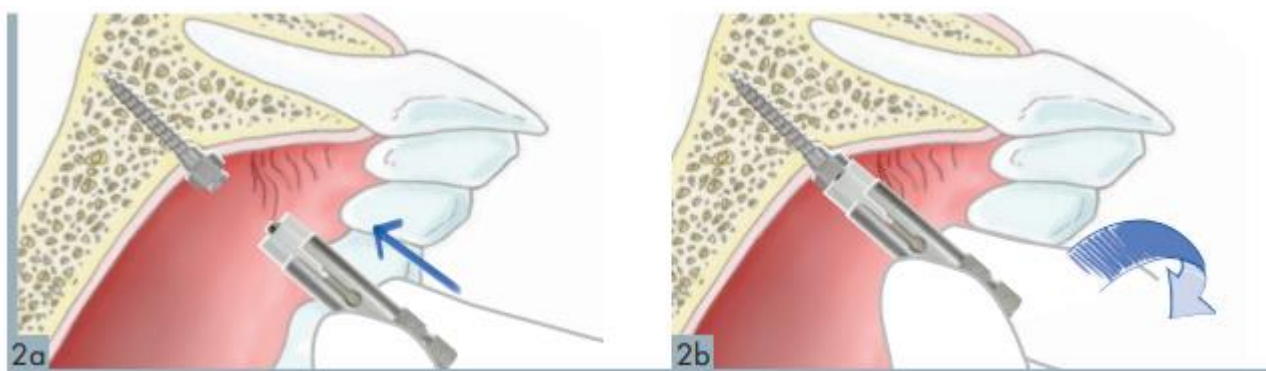

Пригвинтіть Scanbody для TAD до виступаючої частини TAD.

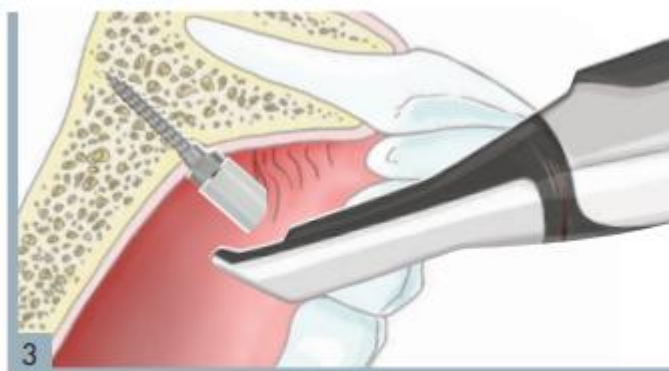

Зробіть цифровий зліпок, щоб створити цифрову модель.